

ÖNE MODE

浴槽ステップチェア

(3段階調整・吸盤付き)

型番：OBS-3
組立・取扱説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。
また、本書はご使用の際にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。
※製品の仕様は予告なく変更することがございます。

⚠️ ご注意

本書は製品を安全にお使いいただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。必ずお読み下さい。

【安全にお使いいただくために】

- 強く飛び乗ったり、座面の端に座ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 座る際は、しっかりと体を安定させてください。安定が難しい方は、必ず介助者の補助のもとご使用ください。
- 平らで安定した場所に設置してください。傾いた場所では使用しないでください。
- 小さくて滑りやすいタイル(モザイクタイルなど)が敷かれた床では使用しないでください。滑って転倒する恐れがあります。

【設置・使用に関して】

- 浴槽内で使用する際は、「追い焚き機能付き」や「直焚き式」のお風呂の場合、お湯の循環・加熱が終わってから設置してください。やけどや破損の原因となります場合があります。
- 使用後は、浴槽から取り出して保管してください。

【禁止事項】

- 分解・修理・加工・改造は絶対にしないでください。
- 強い衝撃や無理な力を加えないでください。破損やケガの原因になります。
- ホコリ・油煙の多い場所での使用や直射日光の当たる場所、高温多湿な場所での保管は避けてください。


【お手入れ方法】

- ベンジン・シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 柔らかい布やスポンジに薄めた中性洗剤を含ませて汚れを拭き取り、その後きれいな水で洗い流してください。

【免責事項】

- 本製品の故障や使用により発生した損害（直接・間接を問わず）について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


セット内容

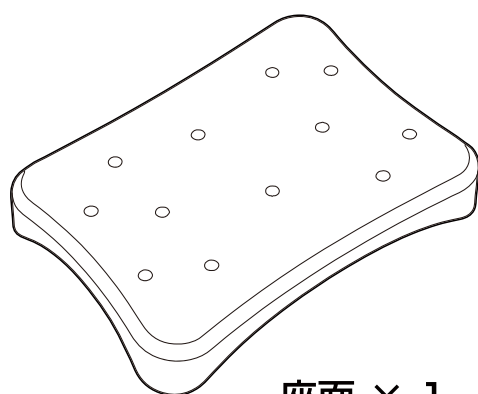

座面 × 1



チェーン × 1

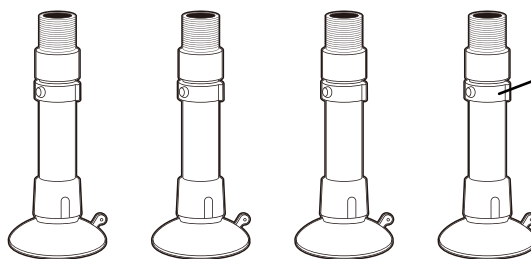

脚 × 4



ロックピン

※ロックピンは
脚それぞれに
1個ずつ装着
されています

製品仕様

型番：OBS-3 / 材質：アルミニウム、ABS、TPR / 製品重量：約 1.4kg
寸法：約 幅 385 × 奥行 285 × 高さ 180・200・220 (mm)

輸入元

ワンモード株式会社

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-342-30

ご購入後の製品についてのご質問等は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。




取扱説明書




部品袋

MADE IN CHINA

- 1** 座面を裏返し、裏面にある○印の4か所に、脚をそれぞれ1本ずつ取り付けてください。
脚は時計回りに回して確実にねじ込んでください。


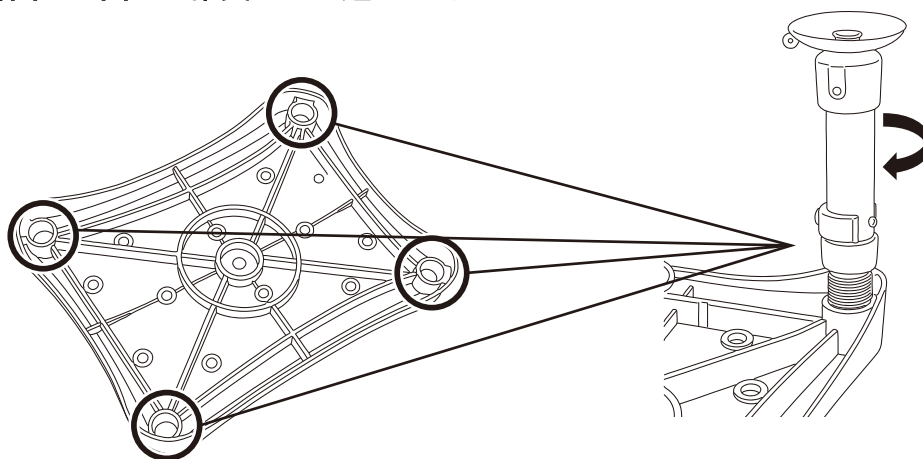


- 2** 脚部からロックピンを取り外し、お好みの高さ（3段階）に穴の位置を合わせて、ロックピンをしっかりと差し込んで固定してください。

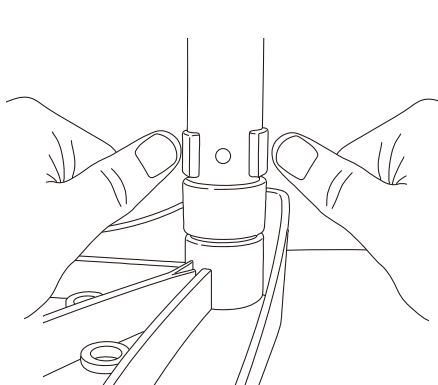

ロックピンの裏側から左右を同時に押し出すようにしてピンを抜く。

※この時、勢いよく飛び出ないように軽く押さえながら抜いてください。

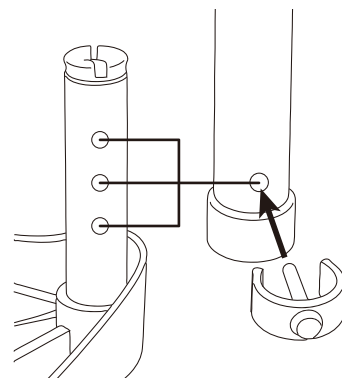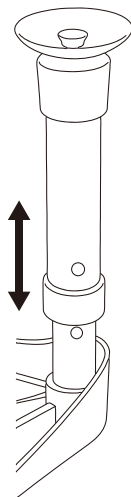


内パイプと外パイプの穴を好きな高さに合わせてロックピンを挿す。



必ず4本全ての脚の高さを同じ高さに揃えてください。


- 3** 吸盤の穴（短辺側の2か所のうち、いずれか）にチェーンを取り付けたら、組み立て完了です。

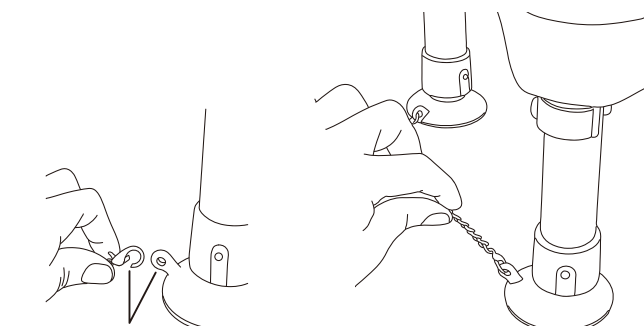

吸盤の穴にフックを取り付ける

チェーンを引っ張ると吸盤を床から取り外すことができます。

※無理に勢いよく引っ張らないでください。
破損の原因となります。

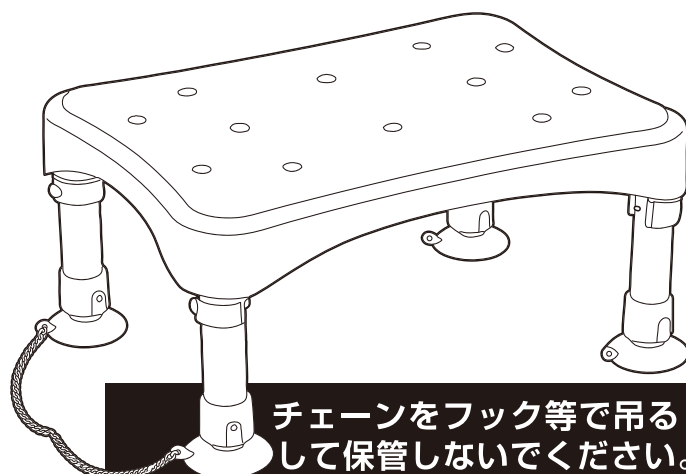

チェーンをフック等で吊るして保管しないでください。
吸盤が変形して、床に吸着しなくなる恐れがあります。